

ANIOSYME D.L.T




החומר מיועד לניקוי של מכשור וציוד רפואי.
ניתן להשתמש ידנית, או באמצעות מכשיר אולטראסוניק.
החומר הפעיל כולל דטרגנט ושלושה אנזימים
(PROTEASE ,LIPASE ,AMYLASE).

הנחיות שימוש לחומר ANIOSYME D.L.T



1 הכנת התמיסה: לכל ליטר מי ברז יש להוסיף 5 מ"ל ANIOSYME D.L.T (אותו ריכוז לשימוש ידני ואולטראסוני) את התמיסה המדוללת יש לשמור במיכל.

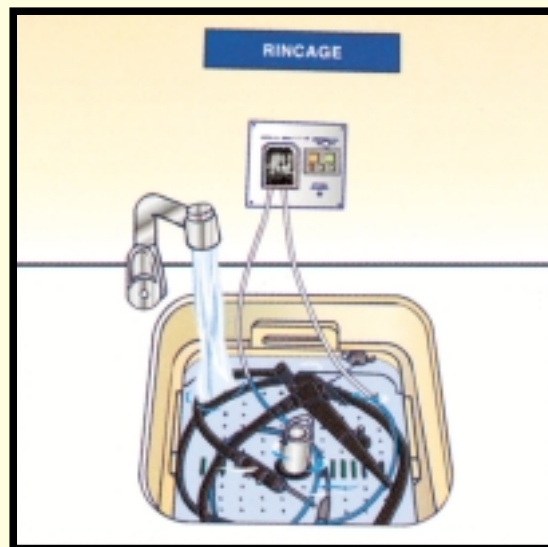

2 שימוש: השריה של ציוד/מכשור בתוך האמבט למשך 5-10 דק', ניקוי ידני באמצעות מטליות או מברשות בהתאם לצורך.

3 בגמר פעולת הניקוי יש לשטוף היטב את הציוד/מכשור במי ברז.

התמיסה המדוללת הנה ברת תוקף ל-24 שעות מרגע ההכנה

עבודה עם כפפות בלבד
אין למלא אמבט השריה מעבר לגובה הכפפות
במידה והחומר ניתז על העור/העיניים יש לשטוף במים

כללי בטיחות